

Cleanway Hospital-Superhoch-Konzentrat

Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat

Eigenschaften

VAH- und IHO-gelistetes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für eine optimale Flächendesinfektion. Frei von Aldehyden, Phenolen und metallorganischen Wirkstoffen.

Das Produkt ist bei der Verarbeitung geruchsneutral, reinigungsaktiv und trocknet schlierenfrei auf.

Cleanway Hospital ist wirksam gegen SARS-CoV-2, grampositive und gramnegative Bakterien, Hefen, Salmonellen, Listerien und behüllte Viren (begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV).

Produktzusammensetzung

In 100 g sind an Wirkstoff enthalten:

10,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid,

11,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin,

14,5 g Phenoxyethanol

Weitere Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG):

Nichtionische Tenside 5 – 15 %, wasserlösliche Lösungsmittel.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7,5

Eidgenössische Zertifizierung

Eidg. Zul. Reg. Desinet kompakt Konzentrat CHZN1588

Anwendungsbereich

Zur Reinigung und Desinfektion von wasserbeständigen Boden-, Wand-, Decken- und Mobiliarflächen in hygienerlevanten Bereichen. Auch auf beschichteten Bodenbelägen einsetzbar.

Sprühdesinfektion und zur oder Microfeiner Vernebelung mit Saniopro von Ghibli.

Anwendung

Vor der Erstreinigung ist die Materialbeständigkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Anwendungsdosierung 25 ml / siehe Tabelle/ siehe Aufkleber

1 Dosierung = 25 ml

Herstellen der Gebrauchslösungen

Lösung immer nur mit kaltem Wasser ansetzen! Dosierung siehe Tabelle.

Zur Objektreinigung:

500-ml-Schaumsprayflasche bis zur Markierung mit kaltem Wasser füllen und 1 Dosierung 25 ml. aus der Konzentratflasche dazu geben. Mit dieser Gebrauchslösung Objekte und Einrichtungen nebelfeucht mit geeigneten Textiltüchern oder Einwegtüchern abwischen

Zur Nasswischreinigung / Desinfizierende Reinigung:

25 ml auf 8 bis 10 ltr. Frischwasser geben und Böden mit Nasswischsystem aufwischen.

Cleanway Schweiz GmbH

Weiherrmattstrasse 1 / 4522 Rüttenen

Telefon 032 – 622 50 30 / cleanway@cleanway-group.ch

Cleanway Hospital-Superhochkonzentrat**Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat**

Prüfmethode	Wirksamkeits-Spektrum	Belastung	Dosierung		Einwirkzeit	Prüfkeime
VAH-zertifizierte Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion mit Mechanik (EN 16615/4- Feldertest)	bakterizid / levurozid	hoch	0,5 %	50 ml / 10 L	15 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans
Prüfmethode	Wirksamkeits-Spektrum	Belastung	Dosierung		Einwirkzeit	Prüfkeime
EN 13697 Flächendesinfektion ohne Mechanik	bakterizid / levurozid	hoch	0,5 %	50 ml / 10 l	15 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans
Prüfmethode	Wirksamkeits-Spektrum	Belastung	Dosierung		Einwirkzeit	Prüfkeime
medizinischer Bereich						
EN 13727 Tauchverfahren quantitativer Suspensionsversuch	bakterizid	hoch	0,5 %	50 ml	1 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli
EN 13624 Tauchverfahren quantitativer Suspensionsversuch	levurozid	hoch	0,5 %	50 ml / 10 L	5 min	Candida albicans
Viruzidie						
DVV / RKI (behüllte Viren) Quantitativer Suspensionsversuch Viruzidie	begrenzt viruzid*	ohne / mit	0,25 %	25 ml / 10 L	30 min	BVDV (Surrogat für HCV), Vacciniavirus
DVV / RKI	siehe Prüfkeime	ohne / mit	2,0 %	200ml/10L	120 min	MNV (Murines Norovirus)
DVV / RKI	siehe Prüfkeime	ohne	0,25 %	25 ml / 10 L	15 min	Rotavirus
industrieller, institutioneller und Lebensmittelbereich						
EN 1276 Tauchverfahren quantitativer Suspensionsversuch	bakterizid	gering / hoch	0,5 %	50 ml / 10 L	1 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli
EN 1650 Tauchverfahren quantitativer Suspensionsversuch	levurozid	hoch	0,5 %	50 ml / 10 L	5 min	Candida albicans

*gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004
Wirksamkeit bestätigt nach EN 1040 und EN 1275 (0,25 %/5 min).

Cleanway Schweiz GmbH

Weihermattstrasse 1 / 4522 Rüttenen

Telefon 032 – 622 50 30 / cleanway@cleanway-group.ch